



MINERALOGRAMA

INSTRUCCIONES PESAJE MUESTRA

1. Ponga la balanza como muestra la figura (lado azul con círculo blanco hacia arriba). Tuerza los bordes negros para formar un pivote y póngalo encima de una superficie plana.

2. Corte unos cabellos de la parte trasera de la cabeza (ver ilustración). Usando tijeras de acero inoxidable, corte cabellos tan cerca de la raíz como sea posible. Puede cortarse varios mechones de cabellos de áreas distintas de la parte trasera de la cabeza si ello facilita la obtención de la muestra.

3. Sólo nos interesan 2,5 cm de cada cabello, los que están cerca de la raíz. Corte y tire el resto. Ponga los cabellos en la balanza dentro del círculo blanco (place hair here).

4. Siga añadiendo cabellos hasta que la balanza se decante por completo. La balanza está diseñada para recolectar unos 0,25 gramos de cabello.

5. Marque la bolsa de plástico con el nombre del paciente (PT NAME), la fecha de nacimiento (DOB), la fecha de recolección del cabello (DATE OF COLLECTION) y el tipo de cabello (HEAD HAIR, PUBIC HAIR o OTHER)

6. Guarde el cabello dentro de la bolsa de plástico, cierre por completo la bolsa apretando toda la línea de sellado (grip) y mándelo siguiendo las instrucciones de la hoja de solicitud.

No olvide cumplimentar todos los datos solicitados especialmente edad y sexo.